







# Plan dezynfekcji



Co?	Jak?	Czym?	Kiedy?
<b>Dezynfekcja narzędzi stomatologicznych</b>	<p><b>Metoda manualna:</b> zanurzyć narzędzia stomatologiczne w roztworze.</p> <p><b>Metoda mechaniczna:</b> mycie i dezynfekcja w urządzeniach ultradźwiękowych. PODDAĆ STERYLIZACJI</p> <p><b>Spektrum działania:</b> Bakteriobójczy (w tym MRSA), niszczący prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, skutecznie zwalczający wirusy otoczkowe takie jak: Vaccinia/BVDV/HBV/HIV/HCV zgodnie z zaleceniem Instytutu Roberta Kocha</p> <p><b>Czas działania:</b> Zgodnie z nowymi wytycznymi DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii)/VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej sprawdzony przy wysokim obciążeniu (w tym Tbc. i MRSA): 1,0%–60 min; 2,0%–30 min; 3,0%–15 min Kąpiel ultradźwiękowa: 1%–5 min. Wirusy otoczkowe takie jak Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, H1N1, H5N1 1,0%–60 min; 2,0%–30 min; 3,0%–15 min.</p>	<p><b>NovoSept</b></p> <p>NovoSept 1   REF 701550191 NovoSept 5   REF 701550195</p> 	bezpośrednio po użyciu narzędzi
<b>Dezynfekcja narzędzi obrotowych</b>	<p>Narzędzia rotacyjne oraz polerujące zanurzyć w gotowym preparacie.</p> <p><b>Spektrum działania:</b> Środek bakteriobójczy, niszczący prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, inaktywujący wirusy (w tym HBV/HIV/HCV/BVDV/Vaccinia).</p> <p><b>Czas działania:</b> Dezynfekcja instrumentów: DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii)/VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej): nierozcieńczony 15 min. Wirusy otoczkowe (HBV/HIV/HCV/BVDV/ Vaccinia/H1N1/H5N1): nierozcieńczony 5 min.</p>	<p><b>NovoDrill</b></p> <p>NovoDrill 2   REF 701550402 NovoDrill 5   REF 701550405</p> 	bezpośrednio po użyciu narzędzi
<b>Dezynfekcja małych powierzchni</b>	<p>Nierozcieńczonym preparatem dokładnie spryskać z odległości około 30 cm powierzchnie i przedmioty do wielkości 2 m<sup>2</sup>. Pozostawić i w razie potrzeby wytrzeć czystą szmatką. Nie spryskiwać powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, np. tworzyw sztucznych na bazie akrylu.</p> <p><b>Spektrum działania:</b> Bakteriobójczy, niszczący prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, skuteczny w walce z wirusami pokrytymi błoną (HBV/HIV/HCV/ BVDV/Vaccinia/H1N1/H5N1).</p> <p><b>Czas działania:</b> Zgodnie z przepisami VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)/DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii): nierozcieńczony 2 min TbB: nierozcieńczony 2 min, wirusy otoczkowe (HBV/HIV/HCV/ BVDV/Vaccinia/H1N1/H5N1): nierozcieńczony 1 min.</p>	<p><b>NovoZid</b></p> <p>NovoZid naturalny 500 ml REF 701550072 NovoZid cytryna 500 ml REF 701550082 NovoZid tropikalny 500 ml REF 701550042</p> <p>NovoZid neutralny 10 l REF 701551072 NovoZid cytryna 10 l REF 701551082 NovoZid tropikalny 10 l REF 701551042</p> 	w razie potrzeby, przed i po każdym zabiegu
<b>Dezynfekcja małych powierzchni, końcówek stomatologicznych (kątnice, turbiny, prostownice)</b>	<p>Dokładnie wytrzeć powierzchnie produktów i przedmiotów medycznych oraz pozostawić, pozwalając na działanie środka dezynfekującego. Nie używać do czyszczenia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Nie nadaje się do szkła akrylowego.</p> <p><b>Spektrum i czas działania:</b> Bakteriobójczy, drożdżakobójczy, zgodnie z przepisami VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)/DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii): 2 min. Niszcząco prątki gruźlicy: 1 min. Wirusy otoczkowe (HBV/HIV/HCV/BVDV/ Vaccinia/H1N1/H5N1): 1 min.</p>	<p><b>NovoWipes</b></p> <p>NovoWipes neutralny, uzupełnienie 100 szt. REF 701550077 NovoWipes cytryna, uzupełnienie 100 szt. REF 701550088 NovoWipes neutralny, opakowanie 100 szt. REF 701550177 NovoWipes cytryna, opakowanie 100 szt. REF 701550188</p> 	w razie potrzeby, po każdym zabiegu
<b>Dezynfekcja dużych powierzchni, np.: podłóg, ścian</b>	<p>Przygotowanym roztworem przemyć zabrudzone powierzchnie (np.: podłogi, ściany), nie splukiwać.</p> <p><b>Spektrum działania:</b> Środek bakteriobójczy (w tym MRSA), drożdżakobójczy, inaktywujący wirusy (HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia/rotawirusy/ papowawirusy/ grypy (H1N1)).</p> <p><b>Czas działania:</b> Zgodnie z dyrektywą DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii)/VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) dotycząca dezynfekcji powierzchni: 1%–60 min; 2%–30 min; 2,5%–15 min Szybka bezalkoholowa dezynfekcja powierzchni: 5%–5 min; 7,5%–1 min.</p>	<p><b>NovoPur</b></p> <p>NovoPur 1   REF 701550241 NovoPur 5   REF 701550245</p> 	w razie potrzeby, po zakończonym dniu pracy
<b>Dezynfekcja systemów ssących</b>	<p>Zawsze świeży NovoSuc rozcieńczyć ciepłą wodą (40 °C) i bezpośrednio zassać. Roztworu nie pozostawiać w urządzeniu na noc.</p> <p><b>Spektrum działania:</b> Środek bakteriobójczy, drożdżakobójczy, inaktywujący wirusy (w tym HBV/HCV/HIV/BVDV/ Vaccinia).</p> <p><b>Czas działania:</b> 2%–15 min zgodnie z przepisami DGHM – Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii/VAH – Stowarzyszenie Higieny Stosowanej. Zwalcza skutecznie wszystkie wirusy otoczkowe: 2%–10 min.</p>	<p><b>NovoSuc</b></p> <p>NovoSuc 2   REF 701550502 NovoSuc 5   REF 701550505</p> 	w razie potrzeby, po zakończonym dniu pracy

**novodenta**

Wylączny dystrybutor: Marrodent Sp. z o.o.  
ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała  
tel. 33 810 13 28

www.marrodent.pl  
www.1dent.pl  
facebook.com/marrodent

marrodent® siedziba  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 31  
tel. 33 810 13 28  
tel. 801 36 36 99  
e-mail: sklep@marrodent.pl

marrodent® oddział  
02-849 Warszawa, ul. Krasnowolska 18 G  
tel. 22 843 06 60  
tel./fax. 22 899 08 80  
e-mail: warszawa@marrodent.pl