

› VITA ENAMIC® – nowa definicja czynnika odporności*



VITA ENAMIC jest pierwszą dentystyczną ceramiką hybrydową na świecie, która posiada strukturę podwójnie usieciowaną. W przypadku tego materiału dentystycznego dominuje siatka ceramiczna, która jest wzmocniona siatką polimerową, przy czym obie siatki całkowicie się przenikają. Ta nowatorska ceramika hybrydowa gwarantuje po raz pierwszy nie tylko znakomitą elastyczność, lecz również wyjątkową odporność na obciążenia, i to natychmiast po zacementowaniu.

› FACTS & FEATURES

VITA ENAMIC jest:

- ceramiką hybrydową, która posiada strukturę podwójnie usieciowaną
- znakomitą kombinacją takich czynników jak wytrzymałość i elastyczność


Korzyści dla gabinetów i pracowni :

- wyjątkowa odporność materiału na obciążenia, dzięki której następuje absorpcja sił żucia
- wykonywanie delikatnych uzupełnień o cienkich ściankach, przy oszczędnej redukcji substancji zęba
- wysoce precyzyjne i wierne w każdym szczególe rezultaty
- szybki i ergonomiczny proces CAM
- właściwości materiału bardzo zbliżone do substancji naturalnych zębów

VITA ENAMIC jest:

- szczególnie zalecany w przypadku wykonywania małoinwazyjnych, delikatnych rekonstrukcji w odcinku przednim / bocznym uzębienia.

*) Ta nowatorska ceramika hybrydowa gwarantuje po raz pierwszy nie tylko znakomitą elastyczność, lecz również wyjątkową odporność na obciążenia, i to natychmiast po adhezyjnym zacementowaniu.

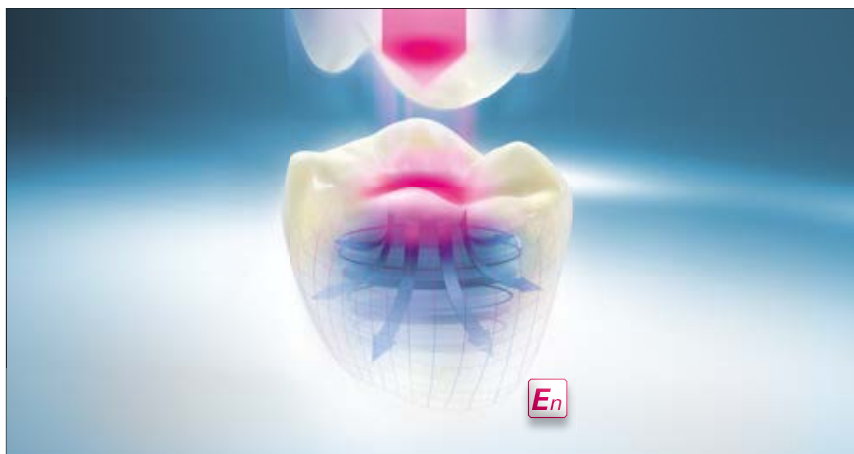

› PODSTAWOWE INFORMACJE

Zalecane zastosowanie?*

- VITA ENAMIC: rekonstrukcje w przypadku niewielkiej ilości miejsca , uzupełnień małych defektów, tabletop, koron odcinka zębów bocznych
- VITA ENAMIC multiColor: estetyczne korony na zęby przednie / boczne, delikatne licówki (Non-Prep)
- VITA ENAMIC IS: korony osadzone na implantach (korony przykręcane)

Etapy procesu wykonawstwa?

Postępowanie 1-etapowe:

- Proces CAM, polerowanie i zacementowanie: napalanie jest zbędne!
- Opcja: charakteryzacja kolorystyczna / indywidualizacja

Kompatybilność systemowa?

VITA ENAMIC – rozwiązania systemowe**

Firma VITA oferuje bloczki VITA ENAMIC z różnymi uchwytami do różnych systemów CAD/CAM:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • CEREC/inLab (Sirona Dental Systems GmbH) | • Planmill 40 (D4D Technologies LLC.) |
| • Ceramill Motion 2 (Amann Girrbach AG) | • TS150 (Glidewell Laboratories) |
| • KaVo ARCTICA/Everest (KaVo Dental GmbH) | • MyCrown Mill (FONA Dental s.r.o.) |

VITA ENAMIC – uniwersalne rozwiązania**

VITA udostępnia materiał VITA ENAMIC z uniwersalnym uchwytem mocującym lub w kształcie DISC dla systemów CAD/CAM:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • seria CORiTEC (imes-icore GmbH) | • seria MILLING UNIT M (Zirkonzahn S.r.l.) |
| • seria Roland DWX (Roland DG) | • seria Organical Desktop (R+K CAD/CAM Technologie GmbH & Co. KG) |
| • CS 3000 (Carestream Inc.) | • Impression K-/S-Modelle (vhf camfacture AG) |
| • Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH) | • DMG ULTRASONIC Serie (DMG Mori AG) |
| • Röders RXD Serie (Röders GmbH) | • inLab MC X5 (Sirona Dental Systems GmbH) |

*) Zalecane zakresy zastosowania: z reguły można stosować we wszystkich możliwych przypadkach uzupełniania zębów pojedynczych. Wszystkie informacje dotyczące produktu można uzyskać z danej instrukcji materiału.

**) Wskazówka: rozmiary, warianty i kolory materiałów VITA CAD/CAM dla poszczególnych systemów CAD/CAM mogą się różnić

Dostępne kolory


- **VITA SYSTEM 3D-MASTER[®], wysoki stopień przezierności**
0M1-HT, 1M1-HT*, 1M2-HT*, 2M1-HT, 2M2-HT*, 2M3-HT, 3M1-HT, 3M2-HT*, 3M3-HT, 4M2-HT*
- **VITA SYSTEM 3D-MASTER[®], przetierne**
0M1-T, 1M1-T, 1M2-T, 2M1-T, 2M2-T, 2M3-T, 3M1-T, 3M2-T, 3M3-T, 4M2-T

* dostępny w postaci VITA ENAMIC multiColor

Wymiary:



EM-14: 12 x 14 x 18 mm

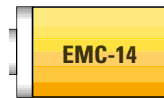

EMC-14: 12 x 14 x 18 mm




EM-10: 8 x 10 x 15 mm



VITA ENAMIC DISC

Ø 98,4/H 12 mm

Ø 98,4/H 18 mm

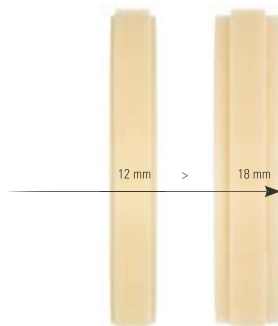


› POJEDYNCZE PRODUKTY/ASORTYMENT

VITA ENAMIC




- Opakowanie VITA ENAMIC po 5 półfabrykatów z ceramiki hybrydowej

VITA ENAMIC Starter Set clinical

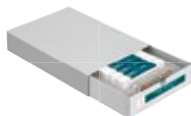

- 10 opakowań po 5 półfabrykatów VITA ENAMIC w 5 kolorach i w 2 stopniach przejrzystości
- VITA ENAMIC Polishing Set clinical

VITA ENAMIC Starter Set technical

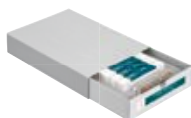

- 10 opakowań po 5 półfabrykatów VITA ENAMIC w 5 kolorach i w 2 stopniach przejrzystości
- VITA ENAMIC Polishing Set technical

› KOMPONENTY SYSTEMOWE

